


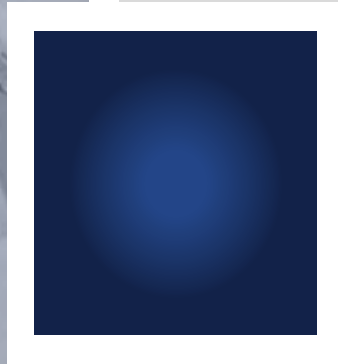

bainternational.com

B.A. International Endodontie Sortiment



BA Optima E+
Kabellose Endodontieeinheit
BAE370R





Einfaches Benutzeroberflächendesign für einfache Bedienung

Kompatibel mit allen D-Typ Feilen

Deutlich lesbare LED-Anzeige

Kabelloses Motorsystem mit integriertem Winkelstück

Kabellose Endodontieeinheit BA Optima E+ BAE370R

Ein speziell entwickeltes kabelloses endodontisches Motorsystem mit reziprokem und normalem Modus.

Reziprok Funktion

Dies ist eine Funktion, die seit vielen Jahren häufig in der Endodontie eingesetzt wird. Die BAE370R hat zwei reziproke Programme und 5 normale Programme. Dies gibt dem Zahnarzt große Flexibilität bei endodontischen Anwendungen. Die Winkel für Vorwärts- und Rückwärts-Rotation können stufenlos eingestellt werden.

Auto Reverse und Auto Stopp Funktionen

Die BAE370R verfügt über eine Auto Reverse Funktion – liegt der aktuelle Drehmoment über dem voreingestellten Drehmoment, bewegt sich die Feile mit Rückwärtsrotation. Sobald die Last entfernt wird beginnt die normale Rotation wieder. Wenn die Auto Stopp Funktion aktiviert ist, stoppt das Handstück nach dem Entfernen der Last.

Andere Funktionen der Optima E+ BAE370R

Lieferung einschließlich 20:1 Kopf (BAE07): Drehzahlbereich 100-600 U/min, Drehmoment: 1-4 Ncm.

- Das Gerät kann mit allen D-Typ-Feilen verwendet werden, einschließlich NiTi.
- 7 Programme (5 normale, 2 reziproke).
- Einfaches Steuerungssystem, ergonomische und kompakte Bauweise für einfache Handhabung.

BAE370R kabellose Endodontieeinheit

Modell	Bestell-Nr.	Beschreibung
BAE370R	BA182050	Kabellose Endodontieeinheit mit Reziprozität.

Modell	Beschreibung
BAE03	10:1 Kopf für BAE370R
BAE05	16:1 Kopf für BA Optima E+ Einheiten
BAE07	20:1 Kopf für BAE370R

BAE370R - Winkelstückköpfe

	BAE07	BAE05	BAE03
Untersetzungsverhältnis	20:1	16:1	10:1
Drehzahl	100 - 600 U/min	100 - 600 U/min	200 - 1000 U/min
Max. Drehmoment	4 Ncm	4 Ncm	2 Ncm
Max. U/min	600	600	1000
Min. U/min	100	100	200
Gewicht	34,8g	34,8g	34,8g
Geeignet zur Reziprozität	Ja	Nein	Nein

BAE370R

	Motorhandstück	Ladestation
Eingangsleistung	N/A	AC100-240V, 50/60Hz, Max. 0,1A
Ausgangsleistung	N/A	DC 4,5V
Nennspannung	DC 2,4V +/- 20% -	N/A
Akku	1,2C x 2EA = 2,4V -	N/A
Ladezeit	N/A	2,5 Stunden



Händlernamen und Details:

B.A. International behält sich das Recht vor, in dieser Broschüre Auslassungen und Fehler zu korrigieren. Alle Bilder in dieser Publikation dienen nur zur Veranschaulichung. KAVO® und MULTiflex LUX® sind eingetragene Warenzeichen der Kaltenbach und Voigt GmbH & Co., Deutschland. Sirona® ist eine eingetragene Marke der Sirona Dental Systems GmbH, Deutschland. NSK® ist eine eingetragene Marke der Nakanishi Inc, Japan. EMS® ist eine eingetragene Marke der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., Schweiz. W&H® ist ein eingetragenes Warenzeichen der W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Österreich. Bien-Air® ist eine eingetragene Marke der Bien-Air Dental S.A., Schweiz. Es gelten die internationalen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von N.B. B.A. © 2018 B.A. International, Unit 9, Kingsthorpe Business Centre, Studland Road, Kingsthorpe, Northampton NN2 6NE, England. E & O E.

B.A. International, Unit 7-10, Kingsthorpe Business Centre,
Studland Road, Kingsthorpe, Northampton NN2 6NE, England.

+44 (0)1604 777 700 | sales@bainternational.com | www.bainternational.com

